



Haarentfernung | Rejuvenation | Akne

# DERMOFLASH



# DERMOFLASH C

## KLASSISCHE SCHNELL-IMPULSLICHT LÖSUNG

- Schnell-Impulslicht Haarentfernung
- Entfernung weißer Haare
- Hautstraffung und Anti-Aging
- Hautverjüngung
- Thermolyse-Einheit mit „Fade In“ System

### NCPL™ TECHNOLOGIE

Mit dem NCPL™-System (kontaktloses Impulslicht) werden starke Lichtimpulse von hoher Intensität erzeugt, die ohne physischen Kontakt auf den Behandlungsbereich projiziert werden.

Die Lichtstrahlung aus den mit Xenon gefüllten Leuchten heizt Haut und Haarfollikel auf und verursacht so einen Verödungsprozess, der zum Ausfallen des Haars führt und ein Nachwachsen verhindert. Durch die NCPL™-Technologie ist kein Kontakt zwischen der Linse des Behandlungskopfes und dem Behandlungsbereich erforderlich. Dadurch entfällt das unsaubere und zeitaufwändige Auftragen von Gel.

Durch die effektiven Schnellladeeigenschaften benötigt der Dermo Flash C für den Betrieb wesentlich weniger Energie und auch weniger Abkühlzeit als traditionelle Geräte.

Der Dermo Flash C ist ideal für ästhetische Kliniken & Institute geeignet, die Haarentfernung, Hautverjüngung und weitere kosmetische Behandlungen durchführen. Mit dem revolutionären, nichtinvasiven NCPL™-System von Med-Op ermöglicht der Dermo Flash C komfortable Behandlungen ohne die Anwendung von Gel. Das System lädt schnell wieder auf und ermöglicht durch die fortschrittliche NCPL™ Technologie größere Hautflächen in kürzerer Zeit zu behandeln.

Die NCPL™ Technologie wird ergänzt durch eine Thermolyse-Einheit für die Entfernung heller Haare. Die Nadel ist mit dem „Fade-In“-System von Med-Op ausgestattet. Die Hautschichten werden allmählich erwärmt und so die Unannehmlichkeiten für den Patienten wesentlich verringert.

### MERKMALE

- Firmeneigenes NCPL™-System
- 2 Betriebsmöglichkeiten - automatisch oder manuell
- Tragbar & kompakt - platzsparend organisiert & einfach zu bedienen für höchsten Komfort
- Anwenderfreundlich - großer Navigationsbildschirm
- Keine Verwendung von Gel - gesunde, bequeme & saubere Behandlung
- Schnelle Impulslichtrate - 1 sek, schneller & leistungsstarker Licht-Impuls
- Zeit- und energieeffizient – schnelle Ladezeit, große Behandlungsköpfe ermöglichen die Behandlung größerer Hautflächen
- Sicherheit - CE Standard



## TECHNISCHE DATEN DERMOFLASH C

### System

Netzspannung	230 Volt +/- 5%, 50/60 Hz
Leistung	90 Watt 12 A Spitze (10 msec)
Bedienung	Mit Schlüssel und Fußschalter
Leuchte	2 Xenonleuchten
Kühlung	Luft
Impulsintervall-Steuerung	1 sek
Gewicht	15 kg
Maße	Länge 57, Breite 40, Höhe 26 cm

### Licht-Impuls Leistung & Spektrum

Haarentfernung	20 bis 95 J bei 500 bis 1200 nm
Akne	30 bis 40 J bei 410 bis 1200 nm
Hautverjüngung	36 bis 44 J bei 640 bis 1200 nm

### Thermolysenadel

Frequenz	2,1 MHz
Leistung	bis zu 12 W
Schaft	0,8 mm

## PARTNER

### BAUMGARTNER & RATH



GmbH

Baumgartner & Rath GmbH  
Hightech Unternehmen  
Fürstenrieder Str. 275  
81377 München  
[www.baumgartner-rath.de](http://www.baumgartner-rath.de)

Lawenta GmbH

Tölzer Str. 37

82031 Grünwald

Tel.: +49 (0)89 1228574-0

[info@lawenta.de](mailto:info@lawenta.de)

[www.lawenta.de](http://www.lawenta.de)